

Manual descarga aplicación móvil Tu Vooz

Bienvenido al manual de descarga de la aplicación móvil de “**TuVooz**”. Esta aplicación ha sido creada para ayudar a personas con discapacidad del habla a comunicarse de manera efectiva, permitiendo la expresión de pensamientos y emociones de manera clara y sencilla. A continuación, te presentamos una guía detallada sobre cómo descargar nuestra aplicación móvil por medio de nuestra página web (<http://tuvooz.com/TuVooz/>).

1. Acceso a una red de wifi

Para comenzar con la instalación de nuestra aplicación móvil, debemos de contar con una buena conexión de internet para que el proceso de descarga sea de manera exitosa.


2. Acceso a la página web.

Al ingresar a nuestro navegador de confianza, te dirigirás a la página web de **TuVooz**, en ella serás recibido por nuestra página de aterrizaje (home page). Aquí encontrarás un mensaje de bienvenida y dos opciones; La primera es para descargar la aplicación móvil y el otro para visualizar el manual de descarga.



3.

Al momento de dar clic a “Descargar app” te aparecerá una ventana emergente y tienes que seleccionar la opción de “Conservar” lo que hará que la descarga comience automáticamente.

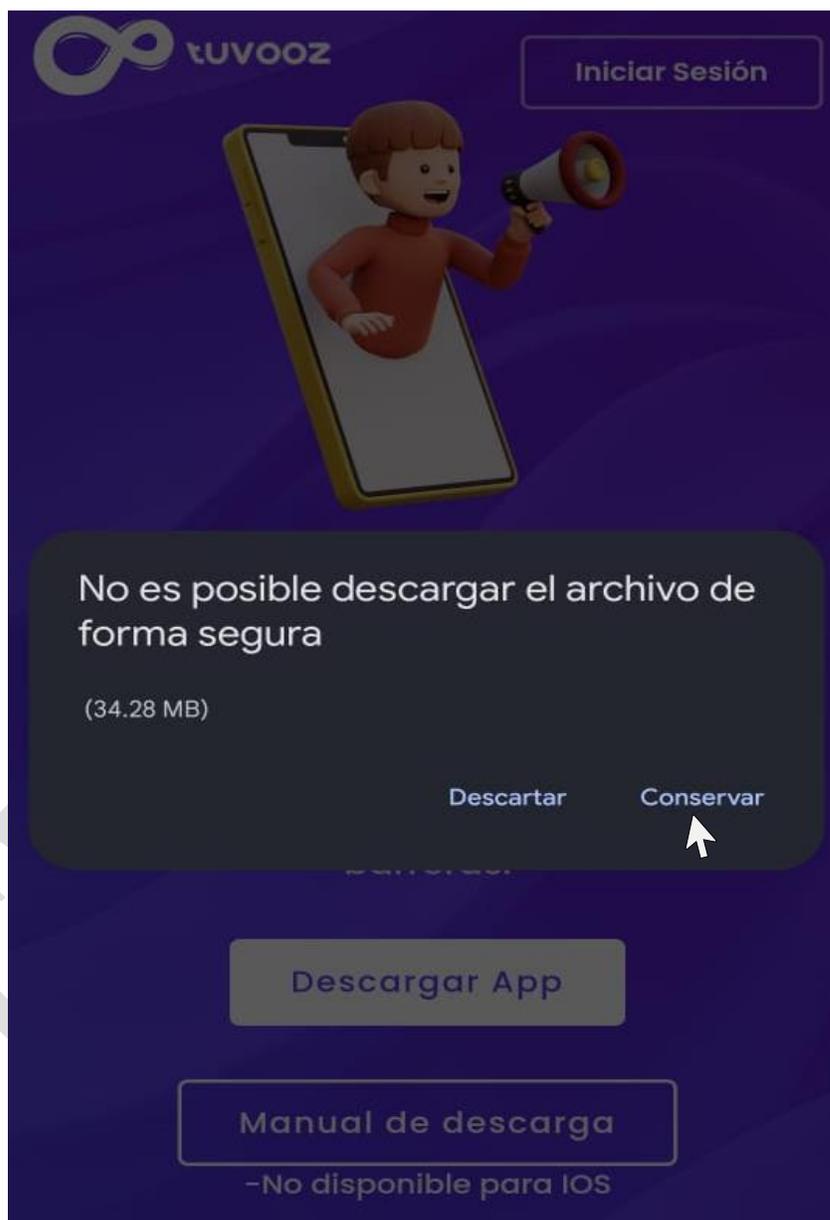


Dependiendo del internet y el espacio de almacenamiento que tengas, de eso dependerá la rapidez de la descarga.



4.


Nos dirigimos a los tres botones que se encuentran en la parte superior derecha del navegador (en este caso Google Chrome) el cual tendrá un menú desplegable.

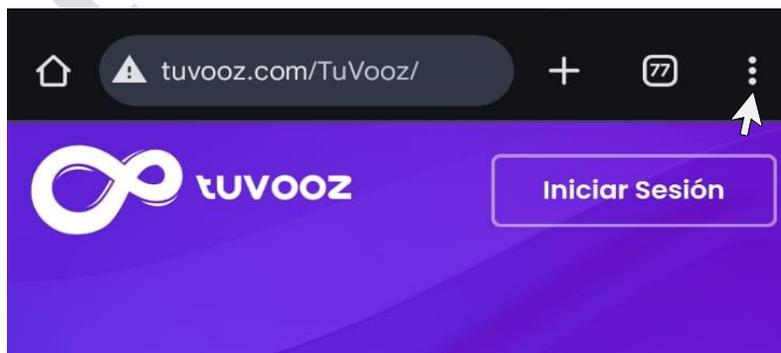

Al momento de aparecer el menú, debes seleccionar la opción de descargas .




Después de seleccionar esa opción te saldrá todas las descargas que has hecho en tu navegador, vas a buscar en tus descargas “tuvoozapk” la cual vas a seleccionar.

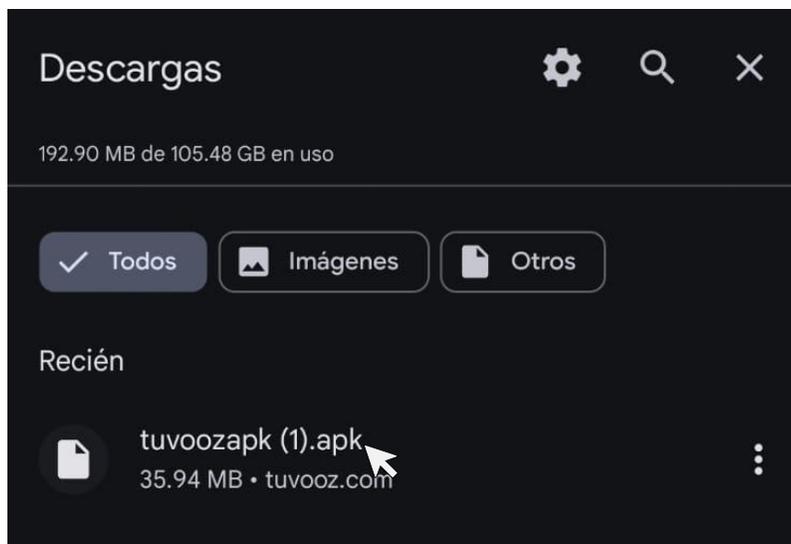

5.


Después de que selecciones la apk de **TuVooz** te va a salir una ventana emergente la cual te dirá que selecciones el instalador de paquetes (puedes seleccionar la opción “solo una vez” o “siempre” según tu preferencia)

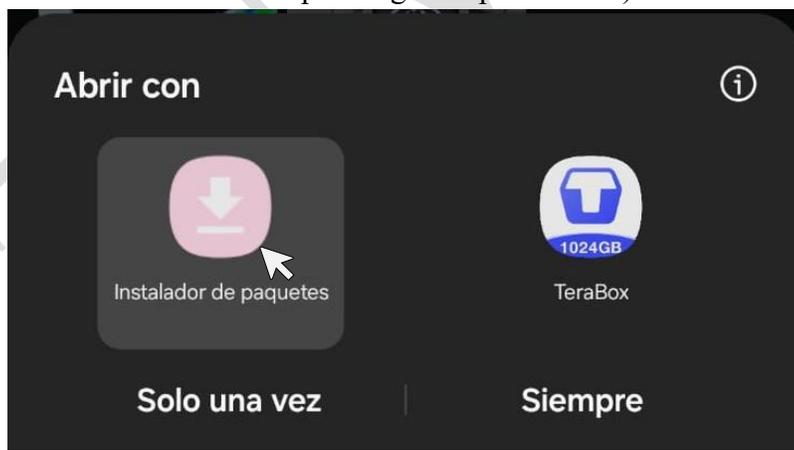


6.

Después de que hayas seleccionado el instalador de paquetes, te va a salir otra ventana emergente la cual va a permitir que el navegador de Chrome instale aplicaciones en tu dispositivo.

Vas a seleccionar la opción de configuración.

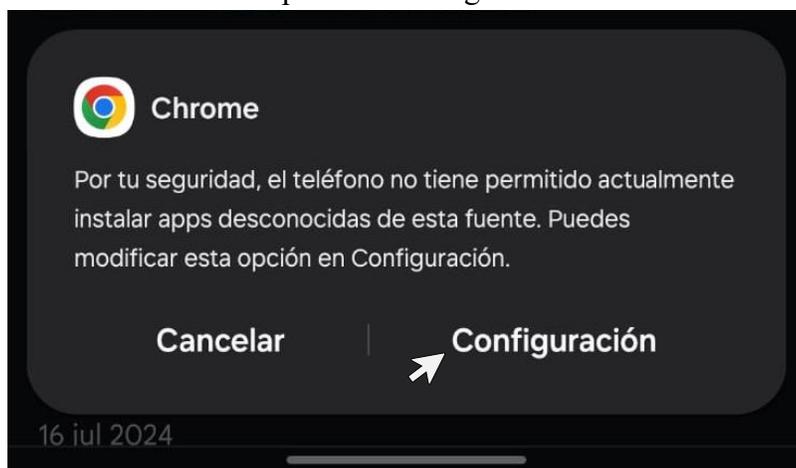


Después de que hayas seleccionado la opción de configuración...

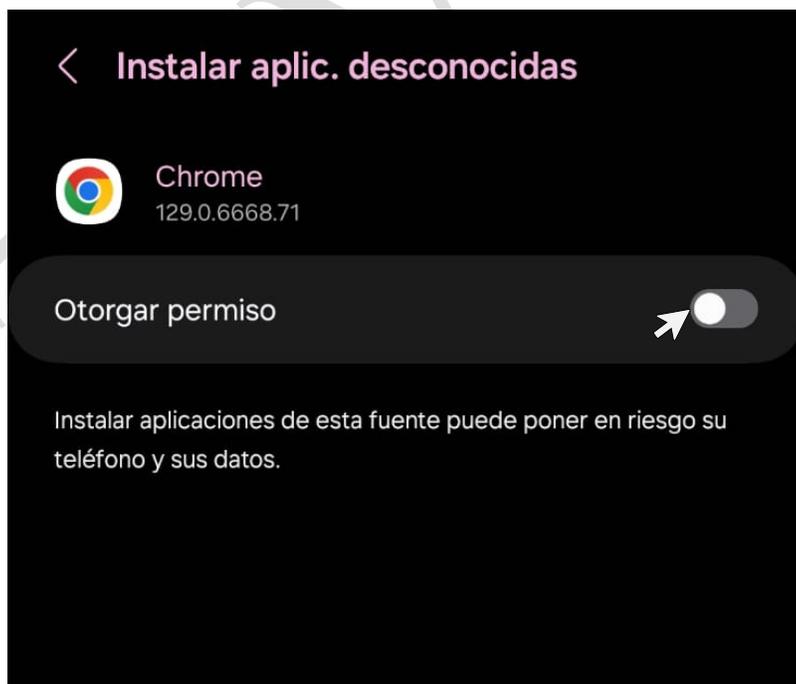


Vas a otorgar el permiso de instalar aplicaciones desconocidas de la fuente de Chrome, seguidamente te saldrá una ventana emergente la cual te preguntará si deseas instalar la aplicación de **TuVooz**, así que debes dar clic en el botón de instalar.




Lo que automáticamente descargará nuestra aplicación móvil de **TuVooz**

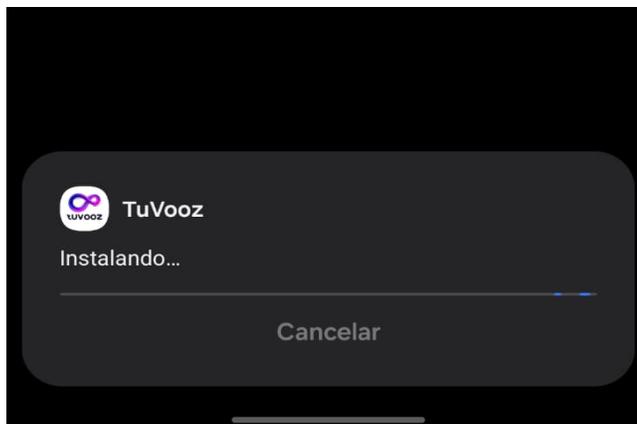


En el proceso de instalación, te aparecerá una ventana emergente de Google play protect la cual menciona que la aplicación de **TuVooz** no se encuentra en Google play y debe hacerse un análisis si la aplicación es segura, darás clic en la opción de analizar app y Google va a comenzar a analizar nuestra app.

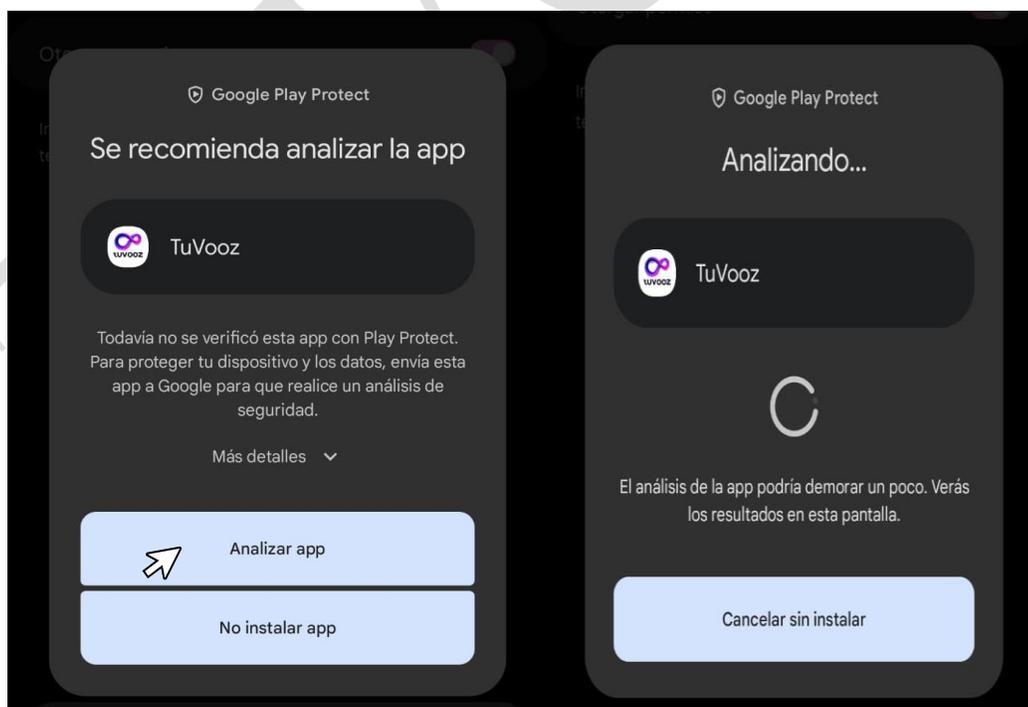

Después de que Google haya finalizado el análisis te va aparecer la opción de instalar

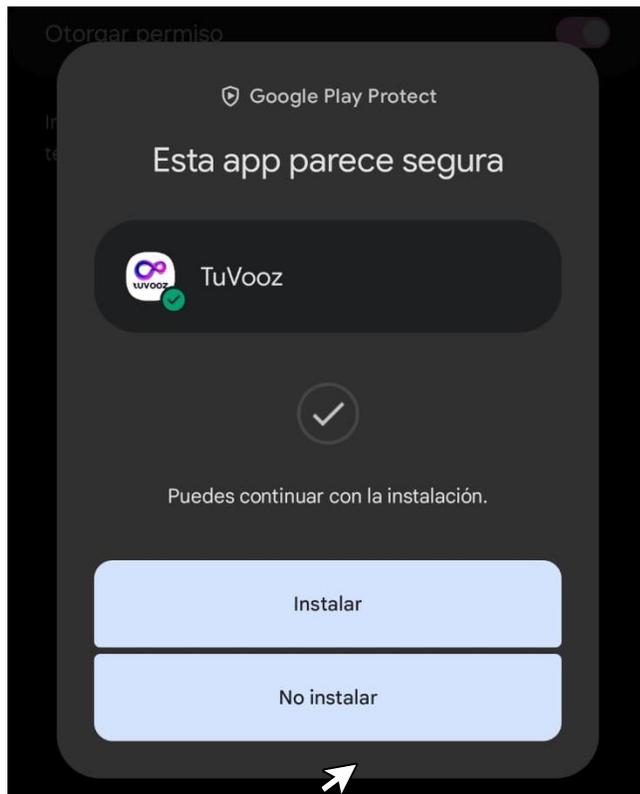

Después de unos segundos nuestra aplicación de **TuVooz** se habrá instalado correctamente, puedes seleccionar el botón de abrir y este te llevará directamente a nuestra aplicación móvil.

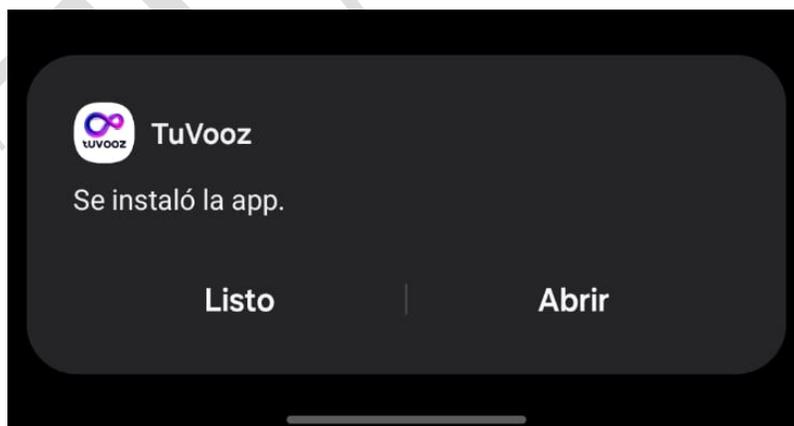

Tambien podrás buscar en tu menú nuestra aplicación que se verá asi en tu móvil.

